

NeoSmile[™]

LÄMPÖTILA-ANTURIN SUOJUS



OMINAISUUDET JA EDUT

- Iho ärsyttämätön NeoBond® hydrokolloidialusta
- Suunniteltu pitkäkestoiseen kiinnitykseen
- Heijastava kalvo antaa suojaa ympäristön lämpöä ja lämpösäteilyä vastaan
- Suloinen hymy kuvio
- Valmistuksessa ei käytetty luonnonkumia (lateksia) tai DEHP-ftalaattia (pehmennintä)

Määrä	Koko	Määrä/Yksikkö
N731	1" (25 mm) Halkaisija	150/laatikko



Valmistettu USA:ssa

KÄYTTÖAIHEET

NeoSmile on tarkoitettu lämpötila-anturin peittämiseen ja kiinnittämiseen.

KÄYTTÖOHJEET

Valmistelu

Puhdista ja kuivaa iho, jolle NeoSmile asetetaan, sairaalan protokollan mukaisesti.

Huomautus: On tärkeää, että iho on mahdollisimman puhdas ja kuiva. NeoSmile ei kiinnity kunnolla kosteaan ihoon tai hiuksiin/karvoihin. Myös öljyt ja voiteet heikentävät kiinnitystä.

ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIA.

Kiinnittäminen

- 1 Ennen muovikalvon irrottamista hydrokolloidiliimaa on lämmitettävä aktiivisesti. Mahdollisia lämmitystekniikoita: pidä liuskoja kämmenten välissä vähintään 60 sekuntia, säteilevän lämpölähteen lähistöllä 10–15 sekuntia tai kemiallista lämmitintä vasten 10–15 sekuntia.
- 2 Irrota ja hävitä kalvo. Aseta NeoSmile anturin ja ihon päälle, ja pidä sitä paikallaan 60 sekunnin ajan, jotta se kiinnittyy varmasti kunnolla.

Poistaminen

- 1 Vaihda NeoSmile 5 päivän välein tai sairaalan protokollan mukaisesti, sen mukaan, kumpi on aiemmin.
- 2 Kyllästä NeoSmile vedellä tai suolaliuoksella.
- 3 Irrota NeoSmile hitaasti ihosta pyyhkien ihoa samalla vedellä tai suolaliuoksella.

HUOMIOT JA VAROITUKSET

Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee ihoärsytystä.

NeoSmile ei kiinnity kunnolla kosteaan ihoon tai hiuksiin/karvoihin.

Myös öljyt ja voiteet heikentävät kiinnitystä.

Älä käytä alkoholia ihon puhdistamiseen ennen kiinnitystä.

Älä käytä uudelleen äläkä kiinnitä uudelleen.

Vain yhden potilaan käyttöön.