

NeoSmile[™]

TEMPERATURSONDEDÆKSEL



FUNKTIONER OG FORDELE

- Hudvenlig NeoBond[®] hydrokolloidbase
- Designet til langvarig vedhæftning
- Reflekterende folie hjælper med at beskytte mod omgivende og strålevarme
- Sødt smiley-design
- Ikke fremstillet med naturgummilatex eller blødgøringsmidlet DEHP

Antal	Størrelse	Antal/Enhed
N731	1" (25 mm) Diameter	150/boks



Fremstillet i USA

INDIKATIONER FOR BRUG

NeoSmile er beregnet til at dække og sikre en temperatursonde.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Rens og tør huden der, hvor NeoSmile skal placeres i henhold til hospitalets protokol.

Bemærk: Det er vigtigt, at huden er så ren og tør som muligt. NeoSmile klæber ikke ordentligt til fugtig hud eller hår. Olier og lotioner vil også påvirke klæbeevnen negativt.

BRUG IKKE ALKOHOL.

Påsætning

- 1 Inden plastforingen fjernes, skal hydrokolloidklæbemidlet aktivt opvarmes. Opvarmningsteknikker omfatter: hold mellem håndfladerne i mindst 60 sekunder, hold tæt på en strålevarmer i 10-15 sekunder eller hold mod en kemisk hælvarmer i 10-15 sekunder.
- 2 Tag foringen af, og kassér den. Påfør NeoSmile over sonden på huden og hold den på plads i 60 sekunder for at sikre korrekt vedhæftning.

Fjernelse

- 1 Udskift NeoSmile hver 5. dag eller i henhold til hospitalets protokol, alt efter hvad der kommer først.
- 2 Mæt NeoSmile med ferskvand eller saltvand.
- 3 Træk langsomt NeoSmile væk fra huden, mens du vasker huden med ferskvand eller saltvand.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Afbryd straks brugen, hvis der opstår hudirritation.

NeoSmile klæber ikke ordentligt til fugtig hud eller hår. Olier og lotioner vil også påvirke klæbeevnen negativt.

Brug ikke alkohol til at rense huden før påføring.

Må ikke genbruges eller sættes på igen.

Kun til brug for en enkelt patient.