

NeoSmile[™] Hydrogel

TEMPERATURSONDSSKYDD



FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Reflexfolie skyddar mot omgivande och strålade värme
- Söt smiley-design
- Hudvänlig vidhäftande hydrogelbas
- Kan omplaceras vid behov
- Isolering av skumskikt
- Innehåller ej naturgummi eller mjukgörare (DEHP)
- Singelpackning

Antal	Storlek	Antal/Enhet
N7321	1" (25 mm) Diameter	75/låda



Tillverkad i USA

NeoSmile™ Hydrogel

TEMPERATURSONDSSKYDD

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Neosmile används för att skydda och säkra temperatursonden.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Förberedelser

Rengör och torka huden enligt gällande riktlinjer på sjukhuset.

Obs! Det är viktigt att huden är så ren och torr som möjligt. Neosmile fäster inte ordentligt på fuktig hud och hår. Även oljor och krämer motverkar vidhäftningen.

ANVÄND INTE SPRIT.

Applicering

- 1 Avlägsna och kasta skyddspappret. Placera NeoSmile Hydrogel över proben och huden.
- 2 Placera om NeoSmile Hydrogel vid behov.

Obs! Om häftämnet inte längre är vidhäftande, tillsätt en droppe vatten (inte saltlösning) till hydrogelen och applicera på nytt.

Avlägsning

- 1 Byt ut NeoSmile Hydrogel var 3:e dag eller enligt riktlinjerna på sjukhuset, vilket som infaller först.
- 2 Lyft försiktigt upp kanten på NeoSmile och dra sakta tillbaka den. Vatten eller saltlösning kan appliceras på kanten för att mjuka upp vidhäftningen.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

Avlägsna genast om hudirritation uppstår.

Neosmile fäster inte ordentligt på fuktig hud och hår. Även oljor och krämer motverkar vidhäftningen.

Använd inte sprit till att rengöra huden innan applicering.

Endast avsedd för användning av en patient.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355



Tillverkad i USA