

NeoSmile[™] Hydrogel

LÄMPÖTILA-ANTURIN SUOJUS



OMINAISUUDET JA EDUT

- Heijastava kalvo antaa suojaa ympäristön lämpöä ja lämpösäteilyä vastaan
- Suloinen hymykuvio
- Ihoa ärsyttämätön hydrogeeliliima-alusta
- Paikkaa voi vaihtaa tarvittaessa
- Vaahtokerroseristys
- Valmistuksessa ei käytetty luonnonkumia (lateksia) tai DEHP-ftalaattia (pehmennintä)
- Yksittäispakattu

Määrä	Koko	Määrä/Yksikkö
N7321	1" (25 mm) Halkaisija	75/laatikko



Valmistettu USA:ssa

NeoSmile™ Hydrogel

LÄMPÖTILA-ANTURIN SUOJUS

KÄYTTÖAIHEET

NeoSmile on tarkoitettu lämpötila-anturin peittämiseen ja kiinnittämiseen.

KÄYTTÖOHJEET

Valmistelu

Puhdista ja kuivaa iho sairaalan protokollan mukaisesti.

Huomautus: On tärkeää, että iho on mahdollisimman puhdas ja kuiva. NeoSmile ei kiinnity kunnolla kosteaan ihoon tai hiuksiin/karvoihin. Myös öljyt ja voiteet heikentävät kiinnitystä.

ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIA.

Kiinnittäminen

- 1 Irrota ja hävitä kalvo. Aseta NeoSmile Hydrogel anturin ja ihon päälle.
- 2 Vaihda NeoSmile Hydrogel -suojuksen paikkaa tarvittaessa.

Huomautus: Jos liima ei ole enää tahmeaa, lisää tippa vettä (ei suolaliuosta) hydrogeeliin ja kiinnitä uudelleen.

Poistaminen

- 1 Vaihda NeoSmile Hydrogel 3 päivän välein tai sairaalan käytännön mukaisesti sen mukaan, kumpi on aiemmin.
- 2 Nosta NeoSmilen reunaa varovasti ja irrota se hitaasti. Liimasidoksen löysäämiseksi reunaan voidaan levittää vettä tai suolaliuosta.

HUOMIOT JA VAROITUKSET

Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee ihoärsytystä.

NeoSmile ei kiinnity kunnolla kosteaan ihoon tai hiuksiin/karvoihin.

Myös öljyt ja voiteet heikentävät kiinnitystä.

Älä käytä alkoholia ihon puhdistamiseen ennen kiinnitystä.

Vain yhden potilaan käyttöön.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355



Valmistettu USA:ssa