

NeoSmile™ Hydrogel

TEMPERATURSONDEDÆKSEL



FUNKTIONER OG FORDELE

- Reflekterende folie hjælper med at beskytte mod omgivende og strålevarme
- Sødt smiley-design
- Hudvenlig hydrogelklæbebase
- Isolerende skumlag
- Flyt efter behov
- Ikke fremstillet med naturgummilatex eller blødgøringsmidlet DEHP
- Individuelt emballeret

Antal	Størrelse	Antal/Enhed
N7321	1" (25 mm) Diameter	75/boks



Fremstillet i USA

NeoSmile™ Hydrogel

HYDROGEL TEMPERATURSONDEDÆKSEL

INDIKATIONER FOR BRUG

NeoSmile er beregnet til at dække og sikre en temperatursonde.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Rens og tør huden i henhold til hospitalets protokol.

Bemærk: Det er vigtigt, at huden er så ren og tør som muligt. NeoSmile klæber ikke ordentligt til fugtig hud eller hår. Olier og lotioner vil også påvirke klæbeevnen negativt.

BRUG IKKE ALKOHOL.

Påsætning

- 1 Skræl og kassér foringen. Placer NeoSmile Hydrogel over sonden og huden.
- 2 Flyt NeoSmile Hydrogel efter behov.

Bemærk: Hvis klæbemidlet ikke længere er klæbrigt, kan du tilsætte en dråbe vand (ikke saltvand) til hydrogelen og påføre igen.

Fjernelse

- 1 Udskift NeoSmile Hydrogel hver 3. dag eller ifølge hospitalsprotokol, alt efter hvad der kommer først.
- 2 Løft forsigtigt kanten af NeoSmile og træk langsomt tilbage. Der kan påføres vand eller saltvand på kanten for at løsne den klæbende forbindelse.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Afbryd straks brugen, hvis der opstår hudirritation.

NeoSmile klæber ikke ordentligt til fugtig hud eller hår. Olier og lotioner vil også påvirke klæbeevnen negativt.

Brug ikke alkohol til at rense huden før påsætning.

Kun til brug for en enkelt patient.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2026 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M853 Rev A 2026.07.01

